



Fyll noggrant i remissens samtliga fält och läs remissens instruktioner.

Aktör och kontaktperson samt farmens prov	Kontaktpersonens telefon
Adress	
Kontaktpersonens e-postadress	Djurhållningsplatssignum* FI0000

*Djurhållningsplatssignumet är obligatoriskt

SPECIFIKATION AV PROVERNA

Hela djur	Blodprov <input type="checkbox"/>	Strykprov <input type="checkbox"/>
Avlivningsuppföljning på smittad gård <input type="checkbox"/>	Avlivningsuppföljning på smittad gård <input type="checkbox"/>	
Övrig uppföljning på smittad gård <input type="checkbox"/>	Övrig uppföljning på smittad gård <input type="checkbox"/>	
Kartläggning, icke smittad gård <input type="checkbox"/>	Kartläggning, icke smittad gård <input type="checkbox"/>	
Misstanke om sjukdom <input type="checkbox"/>	Misstanke om sjukdom <input type="checkbox"/>	
Djurart av proverna		
Mink st.	Vuxna st.	Valpar st.
Blåräv st.	Vuxna st.	Valpar st.
Silverräv st.	Vuxna st.	Valpar st.
Rävkorsning st.	Vuxna st.	Valpar st.
Finnsjubb st.	Vuxna st.	Valpar st.

Remitterande veterinär	
E-postadress	
Resultaten rapporteras till: <input type="checkbox"/> ymparistoterveydenhuolto.lansi@avi.fi	Annan:

Ort och datum	Beställarens underskrift och namnförtydligande
---------------	--



Förpackningsinstruktioner

Förpackningsinstruktioner samt försändelse till Livsmedelsverkets laboratorier.

- Linda in djuret i absorberande material
- Lägg det inlindade djuret i en plastpåse (ca. 30L) som försluts väl.
- Duscha provpåsens yta med ett desinfektionsmedel (70 % etanol eller Virkon S-lösning)
- Fyll en skyddspåse med absorberande material
- Flytta provpåsen in i skyddspåsen och förslut väl
- Lägg påsarna i en kartong låda
- Lägg inte mer än 20 kg i var kartonglåda
- Skriv provkoden samt ett fortlöpande nummer på samtliga lådor
- Lägg remissen i en plastpåse och fäst den på en låda
- Frysta djur läggs i en separat låda
- Skriv "djupfrost" på kartongen med de frysta djuren
- Förse lådan med den mottagaradress som bestämts på förhand, den är antingen "Livsmedelsverket Seinäjoki" eller "Livsmedelsverket Uleåborg"

Leverans av blodprov och strykprov till Virologen vid Livsmedelsverket

- Packa provrören skilt för sig, antingen
 - cellplast eller
 - wellpapp
- Förse provpåsen med absorberande material
- Lägg provpåsen in i en skyddspåse försedd med absorberande material och förslut väl
- Lägg påsen i Livsmedelsverkets gul-svartrandiga provlåda
- Fyll provlådan med fyllningsmaterial och förslut väl
- Fäst remissen på provlådan
- Provlådan, för blodprov och strykprov, bör inte läggas i en låda med hela djur

Samtliga lådor förses med betäckningen UN3373 (biologiskt prov, kategori B).